



# De prikpen die werkt met slechts 1 klik.


## Aanspannen en prikken in 1 klik

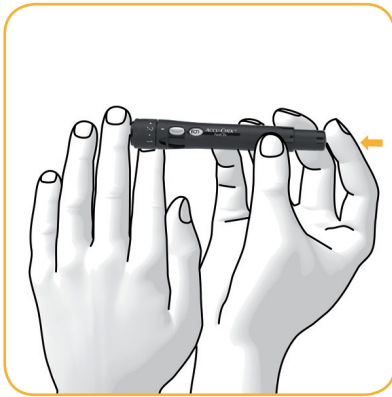

**Bloeddruppel verkrijgen**  
Aanspannen en prikken in 1 klik

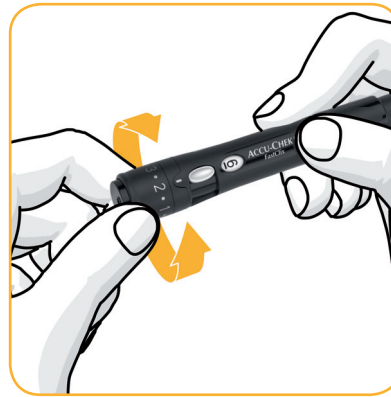

**Prikdiepte instellen**  
Draai de instelling voor de juiste prikdiepte

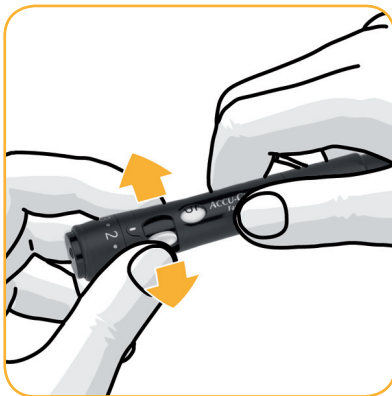

**Lancet vervangen**  
Beweeg het hendeltje heen en weer voor een nieuw lancet

**11 standen** voor iedere huiddikte

Het cijfer in het venster geeft het aantal resterende lancetten aan



**Aanspannen en prikken in 1 klik**

**Zes lancetten** in een houder  
Geen losse lancetten


Hendeltje om eenvoudig een nieuw lancet te verkrijgen

De Accu-Chek FastClix is bedoeld voor gebruik bij zelfcontrole door één persoon. De prikpen mag niet worden gebruikt voor het afnemen van bloed bij verschillende personen.

# Accu-Chek® FastClix Lancethouder vervangen

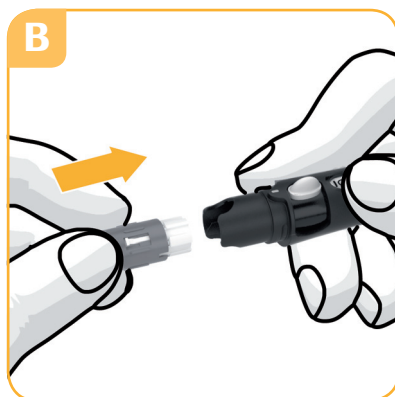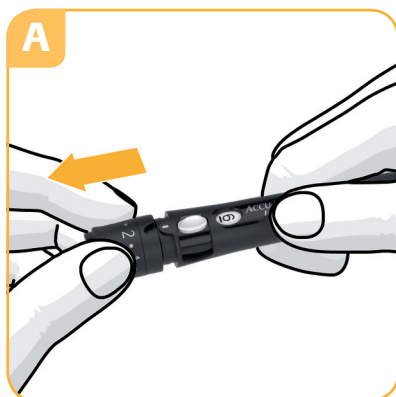

- A** Verwijder de dop
- B** Plaats de lancethouder
- C** Doe de dop weer op de pen

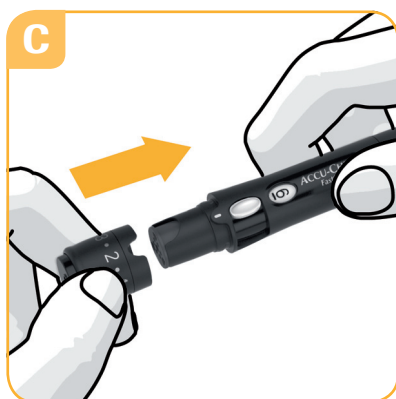

Vervang de houder nadat u het laatste lancet hebt gebruikt  
De lancethouder kan niet worden herplaatst

## Accu-Chek® producten



Accu-Chek Mobile

Accu-Chek Aviva

Accu-Chek Aviva Nano

Ontdek het nieuwe prikken – uw vingertoppen zullen u dankbaar zijn

ACCU-CHEK en FASTCLIX zijn handelsmerken van Roche. © 2011 Roche.

[www.accu-chek.nl](http://www.accu-chek.nl)  
0800 - 022 05 85  
Roche Diagnostics  
Postbus 1007  
1300 BA Almere



**ACCU-CHEK®**