



Accu-Chek® TenderLink

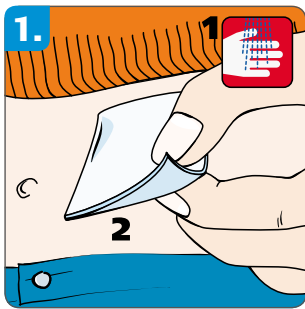


1. Was uw handen.
2. Reinig de infusieplaats overeenkomstig de aanwijzingen van uw arts of diabetesverpleegkundige.

Laat de infusieplaats voor het aanbrengen van canule opdrogen.

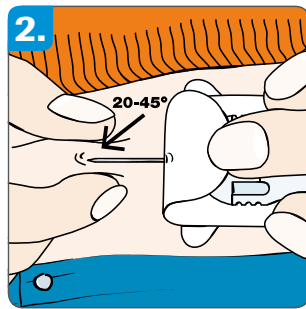


Verwijder de beschermhuls van de inbrengsnaald en de voorste afdekfolie en trek met de wijsvinger de zelfklevende pleister iets terug.

Maak met de andere hand op de gereinigde huid een huidplooi en breng de Accu-Chek TenderLink onder een hoek van 20-45° in onder de huid.

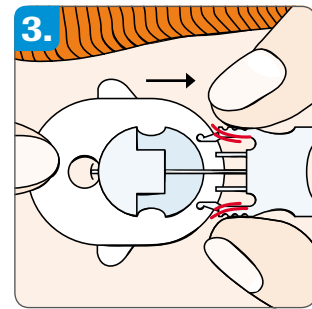


Druk het voorste gedeelte van de zelfklevende pleister stevig op de huid om er zeker van te zijn dat de Accu-Chek TenderLink goed vastzit.

Leg één vinger voor het controlevenster om het vast te houden. Druk licht op de zijklempen van de inbrengsnaald en trek op hetzelfde moment de inbrengsnaald uit de huid.

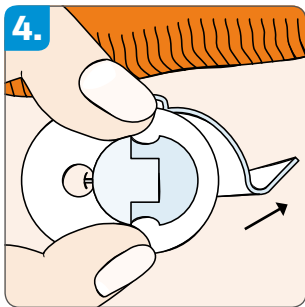


Verwijder de achterste afdekfolie. Druk de zelfklevende pleister stevig op de huid.

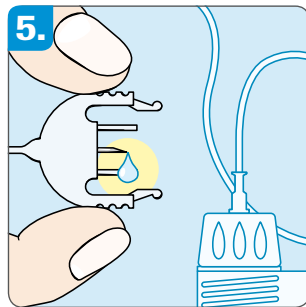

Draai de Lueraansluiting in de adapter van de pomp.

Verwijder het ronde beschermkapje door licht op de zijklempen te drukken.

Vul de Accu-Chek TenderLink overeenkomstig de gebruiksaanwijzing totdat de medicatie uit de punt van de verbindingssnaald druppelt. Controleer of er zich geen luchtbelletjes in de infusieset bevinden.

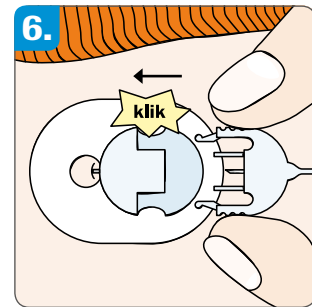

Verbind het zojuist ingebrachte canulegedeelte met de gewelfde kant omhoog. U hoort een klik als de verbinding vast zit.

Verbind het gevulde slanggedeelte met de canulebehuizing. Gebruik een insulinebolus van 0.7 eenheden (0.7U) om de canulebehuizing en de zachte canule te vullen.

Zachte canule	Lengte	13 mm	17 mm		
	Vulvolume	0.7 U*	0.7 U*		
	Vervangen		elke 2-3 dagen		
Slang	Lengte	30 cm	60 cm	80 cm	110 cm
	Vulvolume	7 U*	10 U*	13 U*	18 U*
	Vervangen		elke 6 dagen		

*U 100 insuline

Lees de gebruiksaanwijzingen van Accu-Chek TenderLink voor gedetailleerde informatie.

Ontdek wat mogelijk is.

ACCU-CHEK EN ACCU-CHEK TENDERLINK zijn handelsmerken van Roche. © 2011 Roche Diagnostics

www.accu-chek.nl
0800 - 022 05 85
 Roche Diagnostics
 Postbus 1007
 1300 BA Almere



ACCU-CHEK®